

Fehlermeldung	Fehlertyp / Definition	Wiederherstellungsmethode
100	Analysegerät startet nicht ordnungsgemäß.	Trennen Sie das Analysegerät von der Stromversorgung und starten Sie erneut.
101	Stromversorgung nicht ordnungsgemäß.	Starten Sie nach Überprüfung aller Kabel inkl. Adapter das Analysegerät erneut.
102	Teststreifen wurde nicht ordnungsgemäß erkannt.	QR-Code erneut scannen.
103	Artikelchargennummer (LOT NR.) wurde nicht ordnungsgemäß erkannt.	QR-Code erneut scannen.
104	Der von Ihnen verwendete Testparameter (Teststreifen) passt nicht zu dem von Ihnen ausgewählten Testparameter.	Rufen Sie die Artikelverwaltungsoberfläche auf, um den entsprechenden Artikel (Testparameter) und die Charge (LOT Nr.) hinzuzufügen.
105	Der von Ihnen verwendete QR-Code zur Kalibrierung ist mangelhaft oder passt nicht zum Testparameter (Teststreifen).	Überprüfen Sie den QR-Code auf eventuelle sichtbare Schäden und scannen Sie diesen erneut.
200	Der Teststreifen wurde nicht oder nicht korrekt in die Testschublade eingelegt.	Überprüfen Sie, ob der Teststreifen korrekt in die Testschublade eingelegt wurde und testen Sie diesen erneut.
201	Teststreifen konnte nicht korrekt ausgewertet werden.	Überprüfen Sie, ob der Teststreifen korrekt durch das Scannen des QR-Codes kalibriert wurde und starten Sie den Testvorgang erneut.
202	Teststreifen hat das Ablaufdatum überschritten oder das Analysegerät wurde nicht auf Ihre Zeitzone eingestellt.	Überprüfen Sie, ob die Einstellung Datum/Uhrzeit mit ihrer Zeitzone übereinstimmt. Überprüfen Sie auch das Ablaufdatum des Testkits, welches Sie verwenden. Entsorgen Sie das Testkit gem. den Angaben im Benutzerhandbuch, sollte das Ablaufdatum überschritten sein.
203	Die verwendeten Teststreifen entsprechen nicht den Herstellervorgaben und können nicht erkannt werden.	Ersetzen Sie den von Ihnen verwendeten Teststreifen durch ein vom Hersteller produzierten Teststreifen.